



Cryo

zimmer

Cryo



Kriyoterapi

Kar ve buzun ağrı azaltma ve şişleri indirme konusundaki etkileri eski zamanlardan beri bilinmektedir.

Bağımsız ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak hazırlanmış etkili ve modern terapi yöntemleri

Ödem ve ağrıyı azaltmak için çok fazla soğutulmuş hava kullanan, bugüne kadarki en gelişmiş kriyoterapi.

Oda sıcaklığındaki hava -30°C 'ye soğutulmaktadır, kişiselleştirilmiş terapinin hassas biçimde uygulanması için kolayca ayarlanabilir.

Dünya çapında kullanılan Cryo 5'in devamı olan Cryo 6'da günlük performansınızı kolaylaştırıp geliştirmek için uzun yılların deneyimine dayanan en güncel ve son teknoloji yenilikler ve tasarım özellikleri bulunmaktadır.

Performans

Etkili
Elverişli
Güçlü
Dinamik
Bağımsız
Ekonomik

-30°C



Profesyonel Kriyoterapi

- İskelet ve kas ağrılarınin akut/kronik hastalıkları
- İltihaplar
- Kas krampları
- Spor yaralanmaları
- Ameliyat sonrası koşullar
- Nörolojik hastalıklar

İleri Teknoloji

Cryo 6 bağımsızdır. Kapalı soğutma devresi ile çalışmaktadır, sarf malzeme gerektirmemektedir. Bu da minimum maliyetle maksimum performans sağlamaktır.

Artan kalite ve güvenilirlik için yenilikçi materyalleri kapsayan devrim niteliğinde konsept.

Hızlı Soğutma

Deri sıcaklığında hızlı bir soğuma sağlamak için, soğutulmuş hava deriye -30°C ile uygulanmaktadır. Bu da 10 saniye içinde deri sıcaklığının 5°C'ye düşmesini sağlayarak risksiz analjezik etki yaratmaktadır.

Kolay taşıma

Maksimum performans
Günlük rutinelere ve terapi konseptlerine kolay entegrasyon sağlayan mobil yapıya ve basit taşıma imkanına sahip olan Cryo 6, terapiniz için mükemmel bir ortaktır.

Modern tasarımı ve özel olarak tasarlanmış cam rafı sayesinde çalışma alanı kullanımı optimaldir.

-30°C

Ekonomik Kriyoterapi

Oda sıcaklığındaki hava filtrelenmekte ve kapalı soğutma devresi ile -30°C'ye soğutulmaktadır

- Ekonomik (Sarf malzemesi gerekmemektedir)
- Güçlü(Günde 100 işleme kadar)
- Hijyenik (Büyük ekranlı dokunmatik cam klavye)
- Pratik (İhtiyaca yönelik üst cam raf)

Günlük kullanım için kriyoterapi



Kolay bakım

İzleme sistemi buzu erimiş su seviyesini ölçer ve buz eritme özelliği sorunsuz günlük kullanım sağlar.

Hava filtresinin temizliği kolaydır, tozlandığında vakumla temizlemeniz yeterlidir.



Hassaslık ve Etkililik

Standart başlık 2 ile 5 cm'lik deri uzaklığında yarı sabit ve dinamik işlem için kullanılmaktadır.

5 ve 10 mm'lik başlıklar küçük, dar alanlar ve tetik noktaları için hassas işleme, olanak sağlar.

İşleme uygun doz sağlamak için, değişken hava akışı da kullanılmaktadır.

Hassas



Kolay kullanım

Otomatik bekleme ve ayarlanabilir kontrast olanağına sahip büyük ekranda tüm işlem parametreleri açıkça gösterilir.

Cryo 6'nın hazır 6 programı arasında seçime olanak sağlayan dokunmatik cam klavyesi bulunmaktadır.

Bir program seçin, Başlat'a basın - işte bu kadar!

Aktif, çalışan bir programda doğrudan parametre değişikliği mümkündür.

Tüm teknik parametreler de talep üzerine görüntülenebilmektedir. En önemli önceliklerimizden olan etkili hizmet ve bakım için bir avantajdır.

Kullanıcı Tanımlı Programlar

Bağımsız programlar için 3 destekleyici hafıza olanağı mevcuttur.

Favori program tanımlanabilir. Bu program Cryo 6 açıldığında ve her işlem sona erdiğinde görülür.

Ek olarak, kullanıcı kolay seçim için program olarak kaydedilebilecek 2 dizilimin kombinasyonunu seçebilir.

Bağımsız, Favori ve Dizilim Program Saklama. Üstün işlem verimi ve son teknoloji hassaslık sağlayan, kullanıcı odaklı 3 özellik.

Verim



Geniş uygulama alanı

Soğuk hava ile kriyoterapi, aşağıdaki terapi hedefleri ve çeşitli endikasyonlar için verimli, kullanımı kolay bir yöntemdir;

- Ağrı azaltma
- Yangı / iltihap azaltma
- Kas gerginliğini azaltma
- Metabolizma hızını artırma
- Şişme ve ödem azaltma

Soğuk havanın yoğun şekilde uygulanmasıyla sağlanan güçlü damar dış dokunun hiperemik reaksiyonunu yavaşlatır ve uygulanan termal şokun sonucu olarak analjezik etkiyi destekler.

Cryo 6 ile kriyoterapi özellikle yakın zamandaki travmaların, akut yangıların ve ödemlerin tedavisi için önemlidir.



Hızlı ve güçlü ağrı tedavisi ve antienflamatuvar sonuçlar

Yüksek hava akış hızıyla birleşen 1 ile 5 dakikalık kısa işlemler güçlü bir analjezik etki yaratır.

Daha uzun işlemler özellikle antienflamatuvar açıdan daha derin etkilerle sonuçlanır.

Kasları rahatlatma ve verimli drenaj

Düşük hava akışıyla 5 ile 10 dakika süren daha uzun işlemler kas gerginliğinin ve şişmelerin azaltılmasını sağlar.

Ödem ve yangılar üstündeki pozitif etki aktif artroz, arterit, eklem romatizması, ameliyat sonrası koşullar ve tendopatiler konusunda hastalara etkili tedavi sunar.



Cryo 6, şampiyonların seçimi

Doğal (ilaçsız) enflamasyon ve hematoma tedavisi, kasların rahatlatılması, yırtılmalar ve ağrılar da dahil olmak üzere spor yaralanmalarının tedavisinde kriyoterapi olmazsa olmazdır.

Soğuk yanığı riski taşımayan son derece etkili kriyoterapi, yıllar süren kapsamlı deneyimin ve tedavi edici performans araştırmalarının sonucudur.

Cryo Sistemi üst seviye sporlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hassas ve dinamik kriyoterapi

Cryo 6 eller serbestken çalışmaya olanak sağlayarak mobilizasyon, eklem manipülasyonu veya kas rahatlatma gibi paralel uygulama ve işlem olanakları sağlar.

Küçük başlıklar soğuk ve basınç uyarımına başarılı şekilde karşılık veren spesifik, ağırlı noktalarda veya tetik noktalarında işleme odaklanır.

Teknik Veriler

Güç Kaynağı Versiyonları	220-240 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz 110-120 V / 50-60 Hz
Maksimum Güç Tüketimi	1 kW
Beklemede Güç Tüketimi	260 W / h
IEC 601-1'e göre koruma	Sınıf I, Tip B
MDD / MPG	Sınıf IIa
Tedavi Hortumu Uzunluğu	180 cm
Ebatlar	H 645 mm / W 390 mm / L 680 mm
Ağırlık	60 kg
Tedavi Hava Akışı	9 Seviye , maks. 1000 l / dk.

Hava akışını ve işlem süresini birleştiren 6 program
Kullanıcı tanımlı 3 program
Kullanıcı tanımlı 1 favori program

Kurulum Menüsü
Servis Menüsü

Opsiyonel



Hortum Sabitleme
Aparatı



Standart Tedavi
Hortumu



Frenli Tekerlekler



TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

SSM GROUP İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
Eti Mah. Strazburg Cd. No: 10/A
Sıhhiye, Ankara, Türkiye
Tel : +90 (312) 435 21 66
Fax : +90 (312) 432 49 54
E-mail : info@ssm.com.tr

Zimmer
MedizinSysteme